

Anwendung der Selbsttests

- Behälter mit Flüssigkeit öffnen und ins Röhrchen gießen
- Tupfer 2,5 cm tief pro Nasenloch **3-4 mal** entlang der Schleimhaut und **einige Sekunden** im Nasenloch belassen
- Tupfer in die Lösung geben, **3-5 mal** drehen und **1 min** in der Lösung belassen
- Röhrchen beim Entfernen des Tupfers zusammendrücken und abstreichen
- **3 Tropfen** in Probenvertiefung auf Testkassette
- **15 -20 min** warten